



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CARLO DEL BALZO"-S. MARTINO VALLE CAUDINA
Prot. 0009746 del 13/11/2024
VI-9 (Uscita)

Al personale dell'I.C. "C. Del Balzo"
AI DSGA
Atti /Sito/Albo

Oggetto: DECRETO DI NOMINA ADDETTI ALL'USO ED ALLA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI – A.S. 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 81/2008, comma 1, lett. b) e s. m. i., sentito il RLS

NOMINA

il personale sottoelencato allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate come **titolare** per il ruolo di

ADDETTO ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE)

DOCENTI	PERSONALE ATA	PLESSI DI SAN MARTINO V. C.
Amato Adele Clemente Fiorinda	Palluotto Paolo	Scuola dell'Infanzia
Pagnozzi Anna Maria Cavaiuolo Teresa		Scuola Primaria
Ciriello Maria Patrevida Adriano		Scuola Secondaria di I Grado

DOCENTI	PERSONALE ATA	PLESSI DI ROTONDI
Clemente Giustina Siniscalchi Filomena		Scuola dell'Infanzia Jabbraccio
Viscione Pina		Scuola dell'Infanzia Campizze
Gentile Tiziana		Scuola Primaria Campizze
Cusani Giovanni Finelli Rosangela	Marotta Gianfranco	Scuola Primaria Capoluogo Scuola Secondaria di I Grado

DOCENTI	PERSONALE ATA	PLESSI DI ROCCABASCERANA
Lombardi Genny	Lippiello Giuseppe	Scuola dell'Infanzia
Borrea Giovanna		Scuola Primaria
Petrillo Giacomo		Scuola Secondaria di I Grado



DOCENTI	PERSONALE ATA	PLESSI DI PIETRASTORNINA
Morante Marianna Cosentino Annunziata		Scuola dell'Infanzia
Criscuoli Indro		Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado

Tale figura dovrà svolgere i seguenti compiti:

- tenere in efficienza operativa il DAE (defibrillatore automatico esterno) di competenza in conformità col piano di controllo e di manutenzione di seguito specificato:

<i>Controllo e manutenzione giornaliera</i>
Verifica della presenza del DAE e della sua facile accessibilità.
Verifica della presenza del cartello di segnalazione.
Verifica dell'assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro).
Verifica che la spia sia verde lampeggiante.
<i>Controlli e manutenzione trimestrali</i>
Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori. In caso di verifica negativa provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori con le modalità previste dal libretto di uso e manutenzione del dispositivo.
Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In caso di verifica negativa provvedere ad informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza.
Verifica del controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di esito negativo provvedere ad informare immediatamente il datore di lavoro per la sostituzione.
<i>Controlli e manutenzione semestrali</i>
Esecuzione autotest manuale.
Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo informare immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione.
Controllo della presenza di: almeno n.2 pocket mask, forbici taglia abiti, almeno n.2 rasoi, almeno n.5 confezioni di garze non sterili, almeno n.3 confezioni di guanti monouso.

- in caso di emergenza attuare le misure di soccorso in conformità alle indicazioni ricevute nell'ambito dello specifico corso di formazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pia Farese

MARIA PIA FARESE
13.11.2024 15:29:46 UTC